


Mund- Nasenmaske

MakerSpace Bonn e.V.

Material:

- 2 x Quadrat 18 cm x 18 cm Köpertext
(65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 250g/m²; im Notfall einen ähnlichen Stoff benutzen)
- 2 x Schrägband 90 cm (40mm Breite auf 20mm Breite gefalzt)
- 3 x Schrägband 18 cm (40mm Breite auf 20mm Breite gefalzt)
- 1 x Pfeifenreiniger
- Wundkompressen als Filter (Zetuvit oder ähnliches)




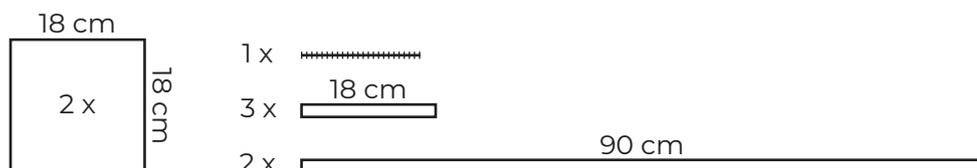


1. Ein 18 cm Schrägband auffalten und mit einer Naht an der Kante des Quadrats befestigen. Dabei kann man sich an der äußeren Falte des Bandes orientieren.

2. Das Quadrat umdrehen und den Pfeifenreiniger im Schrägband einschließen und festnähen. Diese Seite ist die Vorderseite der Maske. (Tipp: eventuell den Pfeifenreiniger erst nach dem Nähen mit Hilfe z.B. eines Esstübchens hineinschieben)

3. Schritte 1+2 bei dem zweiten Quadrat ohne Pfeifenreiniger wiederholen. Diese Seite ist die Rückseite der Maske.

4. Die beiden Quadrate aufeinander legen und die Unterkanten zusammen mit der gleichen Technik mit Schrägband umfassen.

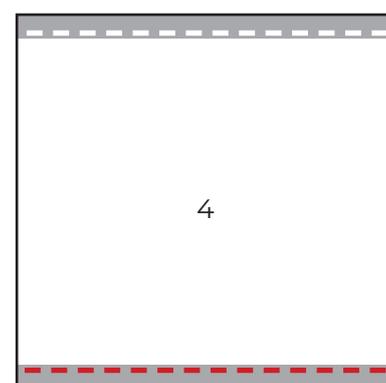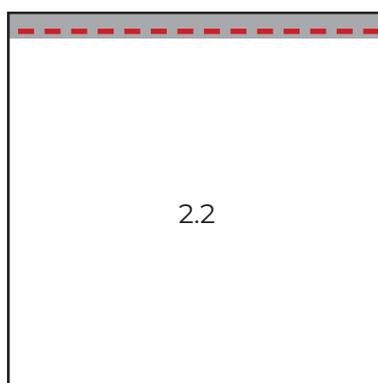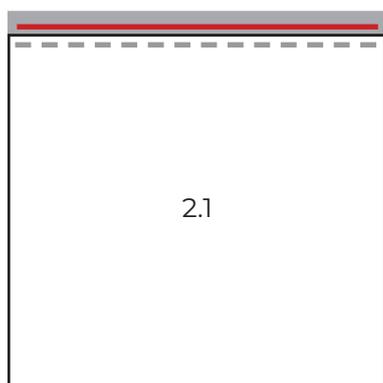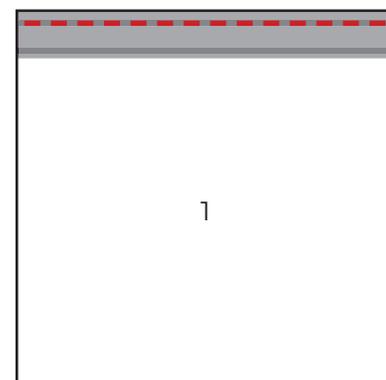

Seite 2 →

Anwendung und Reinigung:

Beim Aufsetzen der Maske eine Wundkomresse als Filter in das Fach zwischen den beiden Stoffseiten legen.

Nach der Verwendung den Filter entsorgen und die Maske bei 90° Celsius in der Kochwäsche waschen oder im Kochtopf für 5 min kochen; falls vorhanden im Autoklav sterilisieren.




MAKERSPACE BONN e.V.
Eine offene Werkstatt für Bonn. Für alle.

Bei einer professionellen Anwendung wird geraten, die Maske alle 2 Stunden zu wechseln.


Mund- Nasenmaske MakerSpace Bonn e.V.

Update vom 8.4.20


5. Auffalten und die beiden Außenseiten nach oben legen.

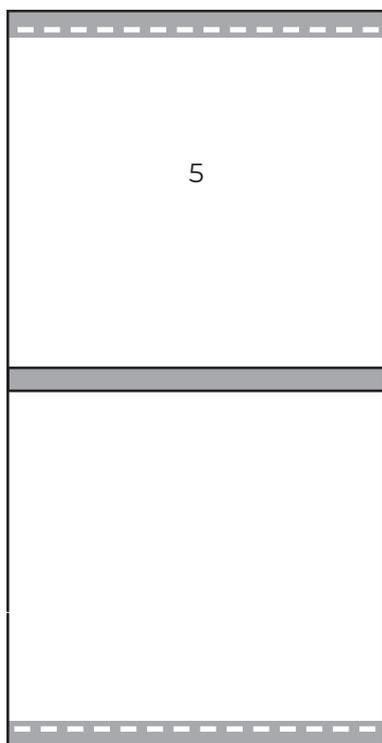


6. Die Quadrate durch 3 gleichmäßig verteilte Falten in Richtung Mitte auf 8 cm Höhe verkleinern; feststecken und mit einer Naht fixieren.

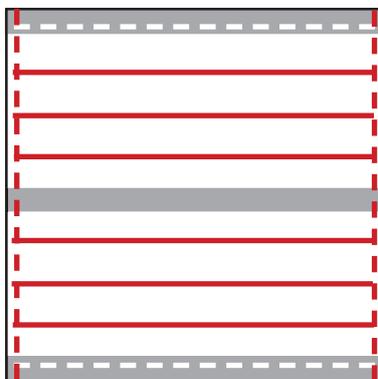


7. Beide Rückseiten aufeinander legen. Die Falten zeigen dann vom Nasenbügel nach unten.

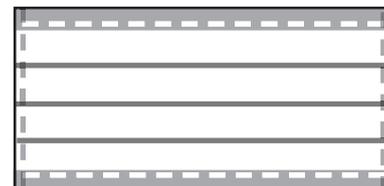


Die Falten zeigen auf der Außenseite der Maske nach unten.

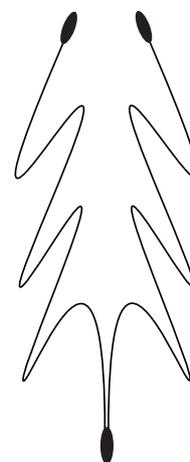

8. Ein 90 cm Schrägband auffalten, mit einer Naht wie in Schritt 1 an der kurzen Rückseite der Maske befestigen.

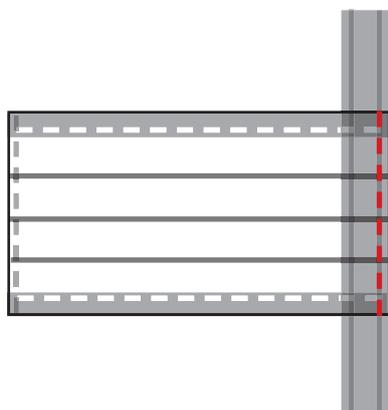

9. Maske auf Vorderseite wenden, dabei mit dem Schrägband die Kante umfassen und festnähen. Bis zum Ende des Bands nähen; dafür werden die Enden des Bandes um 1cm nach innen geschlagen. Schritt 8+9 auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

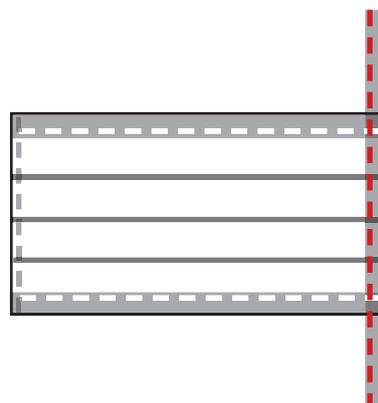

MAKERSPACE BONN e.V.

Eine offene Werkstatt für Bonn. Für alle.